



Адаптер сетевой Модель ТВ-233С



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Японская компания Эй энд Ди благодарит Вас за покупку сетевого адаптера, обеспечивающего приборы для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые автоматические серии UA стабилизированным постоянным входным напряжением. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сетевой адаптер ТВ-233С предназначен для питания от электросети приборов для измерения артериального давления и частоты пульса цифровых автоматических серии UA компании Эй энд Ди, Япония. Так как к электробезопасности медицинской аппаратуры предъявляются строгие требования, данный сетевой адаптер соответствует международному стандарту электробезопасности для медицинских изделий IEC 60601. Это гарантирует стабильную работу прибора при перепадах сетевого напряжения и полную защиту от поражения током во время эксплуатации.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вставьте штепсельную вилку адаптера в розетку электросети.
2. Вставьте до упора штекер адаптера в разъем прибора*.



ПРИМЕЧАНИЕ: используйте адаптер только внутри помещения. Всегда отключайте сетевой адаптер от электросети, если вы им не пользуетесь.

* Для сохранения в памяти прибора результатов измерений не удаляйте элементы питания из отсека для элементов питания при использовании сетевого адаптера.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разбирать адаптер;
- включать адаптер в сеть при снятой крышке корпуса;
- оставлять включенный в электросеть адаптер без присмотра;
- размещать адаптер около источников высокой температуры и под прямыми солнечными лучами;
- прикасаться к адаптеру мокрыми руками;
- использовать адаптер в ванных комнатах и местах с высокой влажностью;
- адаптер не должен подвергаться воздействию капель и брызг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	от 100 до 240В, 50/60Гц	
Выходное напряжение	стабилизированное, 6В	
Максимальный ток нагрузки	500мА	
Размеры	54 x 46 x 21 мм	
Вес	≈ 44 г	
Условия	Эксплуатации	Хранения
Температура	от 0°C до +50°C	от -25°C до +65°C
Влажность	от 25% до +85%	от 25% до +85%

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок адаптера сетевого — 1 год.
Срок службы адаптера сетевого — 10 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать. Распорядитесь старым изделием в соответствии с местным законодательством.

АДРЕСА АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

123480, **Москва**
ул. Вилиса Лациса, д.5, корп.1
(ст. м. «Планерная»)
тел: +7 (495) 269-0245

192029, **Санкт-Петербург**
ул. Ольминского, д. 8
(ст. м. Елизаровская)
Телефон: +7 (812) 777-03-03

400081, **Волгоград**
ул. Маршала Рыбалко, 3, к.56
Телефон: +7 (8442) 35-25-50

644046, **Омск**
ул. Учебная, 199Б
Телефон: +7 (3812) 51-08-96

424000, **Йошкар-Ола**
Ленинский пр-т, 45
Телефон: +7 (836) 276-72-98

614068, **Пермь**
пр-д Якуба Коласа, 11
Телефон: +7 (342) 237-11-60

420111, **Казань**
ул. Тельмана, 15, пом.2
Телефон: +7 (843) 230-40-00

344029, **Ростов-на-Дону**
ул. Плужная, 18
Телефон: +7 (863) 211-11-90

423800, **Набережные Челны**
пр-т Хасана Туфаня, 1, комплекс 42/07
Телефон: +7 (8552) 52-50-75

443074, **Самара**
ул. Мориса Тореза, 105А
Телефон: +7 (846) 261-90-72

350075, **Краснодар**
ул. Сормовская, 1/2
Телефон: +7 (861) 234-09-30

410002, **Саратов**
ул. Мичурина, 144/148
Телефон: +7 (8452) 79-06-05

603146, **Нижний Новгород**
ул. Саврасова, 8
Телефон: +7 (831) 417-17-49

355005, **Ставрополь**
Ул. Льва Толстого, 1216
Телефон: +7 (8652) 71-38-88

630132, **Новосибирск**
ул. Челюскинцев, 54
Телефон: +7 (383) 211-28-17

450080, **Уфа**
ул. Менделеева, 140/3
Телефон: +7 (347) 291-20-45

Полный список сервисных центров смотрите на сайте: www.and-rus.ru

Телефон горячей линии ООО «Эй энд Ди РУС»: **8 800-200-03-80**

Телефонный звонок из любого региона России бесплатный.

Дата продажи:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Число	Месяц	Год			

Печать
фирмы-продавца

ВНИМАНИЕ!

Гарантия действительна только при наличии печати фирмы-продавца.

Комплектация и работа
проверены в присутствии покупателя

Подпись покупателя

РАЗРАБОТАНО: A&D Company, Limited, Japan/Эй энд Ди Компани, Лимитед, Япония
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan/ 1-243, Асахи, Китамото-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan/3-23-14, Хигаси-Икебукуро, Тошима-ку, Токио, 170-0013, Япония
АДРЕС ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Datanyang Industrial Zone, Tiantou Village, Songgang Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China/Эй энд Ди Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., Датанианг Индастриал Зон, Тянтю Вилладж, Сонганган Таун, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Гуандонг Провинс, Китай
ИМПОРТЕР: ООО «Эй энд Ди РУС», РФ, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17
Бесплатный телефон горячей линии: 8 800-200-03-80
Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/09642 от 11.05.2011

MI ADTB233C 1014